



FEMALE CATHETER

КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ (Женский)

# acti-fine<sup>®</sup> Female catheter

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Поливинилхлорид (ПВХ).

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Уретральный катетер для кратковременной катетеризации мочевого пузыря и разового забора мочи у женщин.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук растворами антисептиков
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь катетер, не нарушая его стерильность
- взять стерильный катетер пинцетом в правую руку ближе к дистальному концу (4-5 см)
- перед введением катетера нанести на его поверхность небольшое количество стерильного лубриканта (глицерин, вазелиновое масло)
- обработать наружные половые органы раствором антисептика
- свободный конец опустить в емкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику
- соблюдая правила асептики, осторожно ввести катетер в уретру и провести в мочевой пузырь до появления мочи в просвете катетера, не прилагая чрезмерных усилий во избежание травматизации слизистых оболочек.
- закрепить катетер с помощью пластыря или тесьмы
- по окончании выведения мочи, катетер извлечь
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- для однократного применения
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 C
- обработка и утилизация катетера в установленном порядке



### “ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.

### “ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ ФТАЛАТЫ (ДЕНР)“



Этот продукт содержит пластификатор (ДЕНР). Медицинские изделия, содержащие фталаты не должны использоваться для беременных женщин, кормящих матерей и детей.

## СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

- оксид этилена

