



Dispomed®

INJEKTSTOPFEN

ЗАГЛУШКА ИНFUЗИОННАЯ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Полипропилен (ПП), полиэтилен, без латекса

НАЗНАЧЕНИЕ:

- для герметичного присоединения портов катетеров и инфузионных линий.
- возможность введения лекарственных препаратов иглой через встроенную мембрану, не снимая заглушки.
- длительная инфузионная терапия
- соблюдение внутренней стерильности в период эксплуатации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь заглушку, не нарушая ее стерильность
- инъекционная заглушка может быть присоединена к одной инфузионной системе
- заглушка с мембраной позволяет, сохраняя стерильность, вводить лекарственные препараты через мембрану весь срок использования заглушки
- после использования изделия - обработать и утилизировать заглушку в установленном порядке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- применять только квалифицированным и обученным персоналом
- перед использованием изделия, читать инструкцию
- для однократного применения, не чистить и не подвергать повторной стерилизации
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- если упаковка не имеет повреждений и не вскрыта, то гарантируется, что изделие – не токсично, стерильно, не содержит пирогены, латекс
- заглушку использовать сразу после открытия стерильной упаковки
- после применения обеспечить надлежащее удаление и утилизацию
- обработка и утилизация заглушки в установленном порядке
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 С, в сухом и прохладном месте



“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

-оксид этилена



■ M. Schilling GmbH - Medical Products - In den Kappeswiesen 18 - 63571 Gelnhausen - Germany
Phone +49 60 51 88 90 80 - Fax +49 60 51 6 84 28 - e-mail: info@schilling-med.de - www.schilling-med.de

Импортер: ООО «М. Шиллинг Медикал Продактс Рус»
Россия, Москва, 115280, Ленинская слобода, д. 26, тел. (495)662-72-95

20110707