

SPINAL NEEDLE
ИГЛА СПИНАЛЬНАЯ

acti-fine®
spine-ject®

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Нержавеющая сталь, поликарбонат,
полипропилен

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для пункции спинального пространства с целью диагностики, забора спинномозговой жидкости, анестезии и лечения.
Может поставляться с острием типа Квинке (Quinke) или Пенсил Поинт (Pencil Point).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук растворами антисептиков
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь иглу, не нарушая ее стерильность
- провести антисептическую обработку пункционной зоны
- произвести местную анестезию кожи и подлежащих тканей пункционной зоны
- удалить защитный колпачок
- ввести спинальную иглу в спинальное пространство
- * игла вводится только с obturatorом
- после прокола твердой мозговой оболочки, вынуть obturator из спинальной иглы и подождать появления спинальной жидкости в прозрачном павильоне иглы
- * если спинальная жидкость не появляется, то необходимо с введенным обратно obturatorом поменять глубину постановки иглы
- провести запланированную процедуру
- извлечь спинальную иглу
- закрыть место пункции стерильной салфеткой
- обработать и утилизировать иглу в соответствии с установленным порядком

ВАЖНО:

- не применять излишние усилия при введении иглы – возможно искривление иглы или поломка
- согнутая игла подлежит замене, выпрямлять ее запрещено
- при ощущении сопротивления при введении иглы или появления боли, следует приостановить манипуляции и действовать в соответствии с медицинскими показаниями и методиками

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- транзиторная неврологическая симптоматика
- постпункционная головная боль
- эпидуральная гематома или абсцесс
- пневмоцефалия
- нейротоксичность
- задержка мочи
- гипотония
- брадикардия

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- использовать только квалифицированным медицинским персоналом
- для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 С, в прохладном, сухом месте.
- обработка и утилизация иглы в соответствии с установленным порядком



“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.


СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

-оксид этилена



0044



 M. Schilling GmbH - Medical Products - In den Kappeswiesen 18 - 63571 Gelnhausen - Germany
Phone +49 60 51 88 90 80 - Fax +49 60 51 6 84 28 - e-mail: info@schilling-med.de - www.schilling-med.de

20110707