

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ (УСТРОЙСТВО
ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО ОТБОРА МЕДИКАМЕНТОВ)

Acti-fine®

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

АВС, медицинская сталь

НАЗНАЧЕНИЕ:

- приготовление растворов;
- многократный отбор растворов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия;
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь устройство, не нарушая его стерильность;
- устройство для многократного отбора медикаментов может быть использовано с различными типами коннекторов и мембран;
- присоединить к емкости с раствором или к емкости для приготовления раствора;
- удостовериться, что колпачок плотно закрыт;
- емкость готова к использованию;
- после использования обработать и утилизировать устройство в установленном порядке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- для одноразового применения;
- не использовать при нарушении целостности упаковки;
- срок годности 5 лет с даты изготовления;
- хранить при температуре от -30 до +45 С;
- обработка и утилизация устройства в установленном порядке.

ВНИМАНИЕ

- устойчивость к спиртам и жирам;
- без латекса;
- без ПВХ и фталатов;
- устойчивость к высокому давлению.




“ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

- оксид этилена



 M. Schilling GmbH - Medical Products - In den Kappeswiesen 18 - 63571 Gelnhausen - Germany
Phone +49 60 51 88 90 80 - Fax +49 60 51 6 84 28 - e-mail: info@schilling-med.de - www.schilling-med.de
Импортер: ООО «М. Шиллинг Медикал Продактс Рус», Россия, Москва, 115280, Ленинская слобода,
д. 26. Тел.: +7(495) 662-72-95

20110707