

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ (УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ РАСТВОРОВ)

## Acti-fine®

### ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

АВС

### НАЗНАЧЕНИЕ:

- переливание или смешивание стерильных растворов в замкнутых системах.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия;
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь устройство, не нарушая его стерильность;
- устройство для переливания или смешивания растворов может быть использовано с различными типами закрывающих мембран и коннекторов;
- снять колпачок, присоединить к емкости с раствором или к емкости для приготовления раствора;
- удостовериться, что второй колпачок плотно закрыт;
- емкость готова к использованию;
- после использования обработать и утилизировать устройство в установленном порядке.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- для однократного применения;
- не использовать при нарушении целостности упаковки;
- срок годности 5 лет с даты изготовления;
- хранить при температуре от -30 до +45 С;
- обработка и утилизация устройства в установленном порядке.

### ВНИМАНИЕ

- устойчивость к спиртам и жирам;
- без латекса;
- без ПВХ и фталатов;
- устойчивость к высокому давлению.



### “ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.


### СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

-оксид этилена



0044



 M. Schilling GmbH - Medical Products - In den Kappeswiesen 18 - 63571 Gelnhausen - Germany  
Phone +49 60 51 88 90 80 - Fax +49 60 51 6 84 28 - e-mail: [info@schilling-med.de](mailto:info@schilling-med.de) - [www.schilling-med.de](http://www.schilling-med.de)  
Импортер: ООО «М. Шиллинг Медикал Продактс Рус», Россия, Москва, 115280, Ленинская слобода,  
д. 26. Тел.: +7(495) 662-72-95

20110707