



RECTAL CATHETER

КАТЕТЕР РЕКТАЛЬНЫЙ

# acti-fine<sup>®</sup> rectal catheter

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Поливинилхлорид (ПВХ).

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Катетер предназначен для дренирования прямой кишки, ректального введения лекарственных препаратов, ирригации.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук растворами антисептиков
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь катетер, не нарушая его стерильность
- перед введением катетера нанести на его поверхность небольшое количество стерильного лубриканта (глицерин, вазелиновое масло)
- обработать анальное отверстие раствором антисептика
- подсоединить сборочный пакет
- соблюдая правила асептики, осторожно ввести катетер в прямую кишку на глубину 15-20 см, наружный конец трубки должен выступать из заднего прохода не менее, чем на 10 см.
- избегать травматизации слизистых оболочек
- по окончании процедуры, катетер извлечь
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке

\*для ирригации и введения препаратов соединить разъем зонда с разъемом шприца, кружки Эсмарха или резиновой груши.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- обработка и утилизация катетера в установленном порядке



### “ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.



### “ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ ФТАЛАТЫ (DEHP)”

Этот продукт содержит пластификатор (DEHP). Медицинские изделия, содержащие фталаты не должны использоваться для беременных женщин, кормящих матерей и детей.

## СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

-оксид этилена

