



**acti-fine®**

## Линия соединительная для инфузии

### ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен, поликарбонат, полиэтилен

Продукт не содержит фталаты (DEHP-free)

Допустимые длины: 15, 30, 75, 90, 150, 200, 300 см.

Допустимое давление: 4 bar

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Соединительная линия для удлинения инфузионной магистрали в условиях использования перфузионной техники (шприцевые насосы).

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь удлинительную линию
- концом снабженной накидной гайкой зафиксировать удлинительную линию на катетере или игле
- концом снабженным замком Луер-Лок удлинительная линия фиксируется к шприцу шприцевого дозатора
- по окончании процедуры, удлинительную линию отсоединить от аппарата и пациента
- обработать и утилизировать в установленном порядке.

### ВНИМАНИЕ:

- необходимо использовать удлинительную линию строго по назначению, обращая внимание на технические характеристики материала линии.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- не использовать при нарушении целостности упаковки
- не подлежит дезинфекции и стерилизации с целью повторного использования
- хранить при температуре - 30 до +45 °С
- обработка и утилизация в установленном порядке
- срок годности 5 лет с даты изготовления



### “ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.

CE  
0044

STERILE EO