



UMBILICAL CATHETER

КАТЕТЕР ПУПУЧНЫЙ

acti-fine® umbilic catheter

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Поливинилхлорид (ПВХ).

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для катетеризации пупочной вены новорожденных с целью проведения инфузионно - трансфузионной терапии или парентерального питания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук растворами антисептиков
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь катетер, не нарушая его стерильность
- после обработки растворами антисептика и перерезания пуповины, аккуратно ввести пупочный катетер в пупочную вену на необходимую глубину
- закрепить катетер относительно пуповины
- обработать культю пуповины растворами антисептика
- сразу после проведения манипуляций, катетер необходимо удалить*
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке

* При невозможности проведения инфузионной терапии через периферические вены, катетер продвигается глубже и фиксируется.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- для однократного применения
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 С
- обработка и утилизация катетера в установленном порядке



“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.



“ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ФТАЛАТЫ (DEHP)”

Этот продукт не содержит пластификатор (DEHP).

СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

-оксид этилена

CE
0044

STERILE EO