



PEN NEEDLES

ИГЛЫ ИНСУЛИНОВЫЕ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Иглы инсулиновые предназначены для подкожного введения инсулина с помощью автоматических шприц-ручек.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

*** обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием**

- подтвердить наличие иглы с требуемым размером и длиной
- проверить целостность упаковки и срок годности изделия


1. удалить защитную оболочку с внешнего защитного колпачка
2. шприц-ручку совместить с резьбовой частью иглы, повернуть




- по часовой стрелке, убедиться в прочности соединения




3. снять внешний защитный колпачок

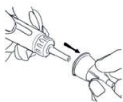

4. снять внутренний защитный колпачок

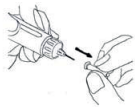

5. ввести инсулин в соответствии с рекомендациями лечащего врача

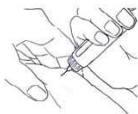

6. удалить использованную иглу, надев внешний защитный колпачок на иглу и повернуть его против часовой стрелки



- Инсулиновые иглы Acti-Fine можно использовать с любыми системами шприц - ручек (перечень находится на упаковке). При возникновении вопросов по их использованию просьба обратиться к лечащему врачу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- для однократного применения
- остерегайтесь инфекции, не использовать при нарушении целостности упаковки
- для обеспечения правильной дозировки, проверьте поток инфузии инсулина через иглу с помощью функциональных тестов (подробно описаны в инструкциях, прилагаемых к шприц-ручкам).
- не изменять угол наклона иглы после прокалывания кожи иголкой, так как это может привести к деформации или поломке иглы
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 С, в сухом и прохладном месте
- обработка и утилизация игл в установленном порядке

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

- хранить иглы в прохладном, сухом месте, вдали от источников тепла и влаги
- для того чтобы избежать повреждений кожи, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом об возможных изменениях мест инъекции
- если жидкость капает из иглы после того, как игла была удалена с поверхности кожи, нужно оставить иглу в месте инъекции дополнительно на 10 сек. В дальнейшем необходимо удостовериться в адекватности дозировки.



“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

- оксид этилена

CE
0044

STERILE EO