

Redon suction system (without drain)

КАМЕРА ДРЕНАЖНАЯ (450 мл)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Полипропилен (PP),
полиэтилен (PE), ПВХ, ABS

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для проведения активного вакуумного дренирования (без дренажной трубки). Объем камеры до 450 мл., максимальное разрежение до 800 mb.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь дренажную камеру, не нарушая ее стерильность
- присоединить к дренажной камере дренажный катетер и систему отсоса
- поместить дренажный катетер в место накопления патологического отделяемого в соответствии с правилами общехирургической практики
- включив систему отсоса, создать вакуумное разрежение в системе
- провести дренирование в пределах необходимого объема и времени
- при необходимости подвесить камеру, используя гибкое регулируемое устройство
- при заполнении большей части объема камеры, опорожнить емкость путем отсоединения от катетера
- отсоединить камеру после окончания манипуляций
- обработать и утилизировать камеру в соответствии с установленным порядком.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- применять только квалифицированным и обученным персоналом
- для однократного применения, не чистить и не подвергать повторной стерилизации
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- камеру использовать сразу после открытия стерильной упаковки
- после применения обеспечить надлежащее удаление
- обработка и утилизация дренажной камеры в установленном порядке
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 С, в сухом и прохладном месте



» ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО «ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»


Продукт должен быть только стерильным, разовым и предназначен только для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключены. Повторное использование одноразовых продуктов потенциально рискованно для пациентов и пользователей. При ухудшении свойств материала и недостаточной стерильности может привести к заболеванию, поражению или к смерти пациента.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

-оксид этилена



0434

 Медикопласт Интернешнл ГмБХ Хойзвайлерштрассе, 100 66557 Иллинген, Германия

Tel.(49) 06825-94240

Импортер: Россия, Москва, 115280, Ленинская слобода, д. 26, тел. (495)662-72-95