

**acti-fine**

URINE BAG PAED+

МОЧЕПРИЕМНИК (детский 100, 200 мл.)

# URINE bag

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Поливинилхлорид (ПВХ).

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для сбора мочи у детей раннего возраста.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук растворами антисептиков
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь мочеприемник, не нарушая его стерильность
- снять защитную бумажную ленту с фиксирующего липкого слоя
- приклеить мочеприемник к половому органу ребенка (у мальчиков - мошонку поместить внутрь мочеприемника)
- после сбора мочи снять мочеприемник
- отрезать уголок дна мочеприемника и слить мочу в емкость для анализа
- обработать и утилизировать мочеприемник в установленном порядке
- не оставлять мочеприемник прикрепленным более часа, с заменой на новый.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- для одноразового использования, не подлежит дезинфекции и стерилизации
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 С
- обработка и утилизация мочеприемника в установленном порядке



### “ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.

### “ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ ФТАЛАТЫ (ДЕНР)“



Этот продукт содержит пластификатор (ДЕНР). В случае применения медицинских материалов, содержащих фталаты (ДЕНР), необходимо следить, чтобы материал не попал в тело пациента.

## СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

-оксид этилена

STERILE EO

CE

0044