



URINE BAG+ / leg+

МОЧЕПРИЕМНИК

(прикроватный / ножной)

acti-fine

URINE bag

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Поливинилхлорид (ПВХ).

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для сбора мочи при мочеиспускании.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук растворами антисептиков
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь мочеприемник, не нарушая его стерильность
- удостовериться, что кран либо клапан выпускного отверстия закрыт.
- снять колпачок с конического коннектора на трубке, подсоединить коннектор к катетеру
- зафиксировать мочеприемник (бедро, кровать, стойка), используя дополнительный держатель (при его наличии) на желаемой высоте, чтобы обеспечить свободный поток мочи. Либо зафиксировать мочеприемник другим способом.

*Мочеприемник всегда должен располагаться ниже уровня мочевого пузыря.

-для опорожнения мочеприемника: удерживая мочеприемник над унитазом, открыть кран или клапан выпускного отверстия, когда мешок станет пустым, снова закрыть кран или клапан выпускного отверстия.

-обработать и утилизировать мочеприемник в установленном порядке

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- для одноразового использования, не подлежит дезинфекции и стерилизации
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 С
- обработка и утилизация мочеприемника в установленном порядке



“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.



“ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ ФТАЛАТЫ (DEHP)”

Этот продукт содержит пластификатор (DEHP). Медицинские изделия, содержащие фталаты не должны использоваться для беременных женщин, кормящих матерей и детей.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

-оксид этилена

STERILE EO

CE

0044