



**Dispomed®**

КАТЕТЕРСПРИТЗЕН

ШПРИЦ МЕДИЦИНСКИЙ (не инъекционный), 120 мл

#### **ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:**

Полипропилен (ПГ), полисопрен

#### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

Предназначен для проведения ирригации в области операционной манипуляции, промывания зондов, катетеров, полостей, введения препаратов.

Катетер-тип, Лувг-коннектор.

#### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь шприц, не нарушая его стерильность
- набрать необходимое количество жидкости или лекарственного препарата из флакона
- возможно подсоединение к шприцу инфузионной системы
- начать и продолжать подачу жидкости до полного выполнения процедуры
- обработать и утилизировать шприц в установленном порядке.

#### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:**

- для однократного применения
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 С
- обработка и утилизация шприцов в установленном порядке.



#### **“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”**

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.

#### **СТЕРИЛИЗАЦИЯ:**

- оксид этилена.

CE  
0044

STERILE EO

■ M. Schilling GmbH - Medical Products - In den Kappeswiesen 18 - 63571 Gelnhausen - Germany  
Phone +49 60 51 88 90 80 - Fax +49 60 51 6 84 28 - e-mail: info@schilling-med.de - www.schilling-med.de

Импортер: ООО «М. Шиллинг Медикал Продактс Рус»  
Россия, Москва, 115280, Ленинская слобода, д. 26, тел. (495)662-72-95

20110707