



Dispomed®

PUMPENSPRITZEN

ШПРИЦ МЕДИЦИНСКИЙ (не инъекционный)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Полипропилен (ПГ), полиспирен

Игла-медицинская сталь

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для внутривенного введения лекарственных препаратов и растворов при помощи шприцевого насоса.

Шприцевой насос обеспечивает точное дозированное введение лекарства при проведении инфузионной терапии.

В ассортименте - игла.

Цилиндр может быть прозрачным или светозащищенным.

Соединение Luer Lock.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь шприц, не нарушая его стерильность
- набрать необходимое количество лекарственного препарата из флакона
- шприц с раствором установить в шприцевой насос
- подсоединить к шприцу инфузионную систему
- установить скорость введения в соответствии с указаниями
- начать и продолжать инфузию до полного вливания объема препарата
- обработать и утилизировать шприц в установленном порядке

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- для однократного применения
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 С
- обработка и утилизация шприцов в установленном порядке



“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

-оксид этилена

CE
0044

STERILE EO

■ M. Schilling GmbH - Medical Products - In den Kappeswiesen 18 - 63571 Gelnhausen - Germany
Phone +49 60 51 88 90 80 - Fax +49 60 51 6 84 28 - e-mail: info@schilling-med.de - www.schilling-med.de

Импортер: ООО «М. Шиллинг Медикал Продактс Рус»
Россия, Москва, 115280, Ленинская слобода, д. 26, тел. (495)662-72-95

20110707